


วิธีการทำความสะอาด เครื่อง Autoclave ด้วย พงล้างทำความสะอาด

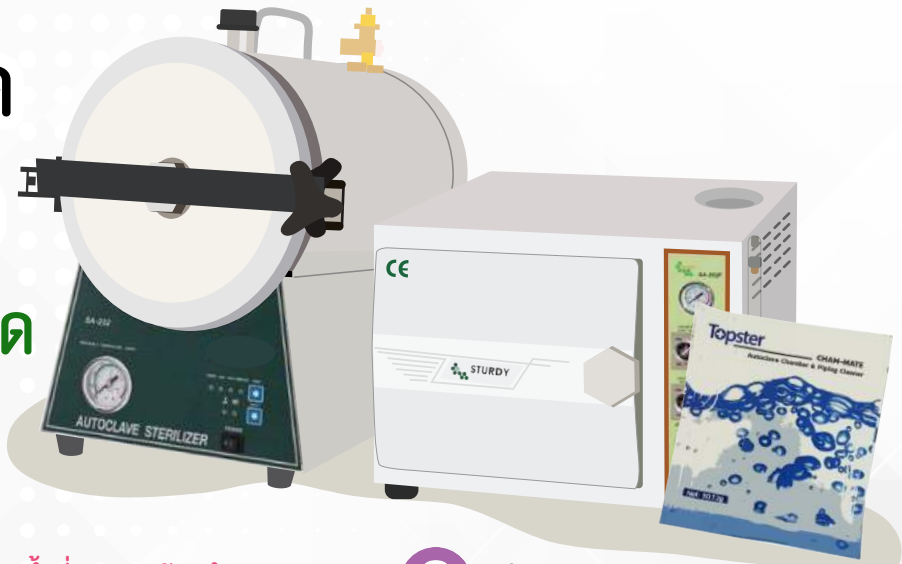

ขั้นตอนการล้างเครื่อง Autoclave

- 1** ผสมผงล้างทำความสะอาด TOPSTER "CHAM-MATE" ลงในน้ำ 500 cc
- 2** เทน้ำที่ผสมผงล้างทำความสะอาด ใส่ในห้องนึ่ง
- 3** ทำการ Sterilization



- ผสมผงล้างทำความสะอาด ลงในน้ำ 500 cc
- ผงล้าง 1 ซอง สำหรับเครื่องขนาดต่ำกว่า 30 ลิตร
- ผงล้าง 2 ซอง สำหรับเครื่องขนาด 30 -100 ลิตร



- นำน้ำที่ผสมผงล้างทำความสะอาด ในข้อ 1 เทใส่เข้าไปในห้องนึ่งของเครื่อง Autoclave
- เติมน้ำในห้องนึ่งเพิ่มจนท่วมคอยล์ความร้อน



- ปิดประตูห้องนึ่งให้สนิท จากนั้นทำการเปิดเครื่อง Autoclave ให้เริ่มทำงาน Sterilization (โดยไม่ต้องใส่อุปกรณ์ หรือห่อผ้าเข้าไป)
- ไม่ต้องใช้ขั้นตอนอบแห้ง (Dry Heat) ในการล้างเครื่อง Autoclave

- 4** ระบายน้ำในห้องนึ่งทิ้ง กรณีที่เครื่องไม่มีถังพักน้ำ



- เมื่อเสร็จสิ้นการทำงาน Sterilization ให้ปิดเครื่อง จากนั้นทำการระบายน้ำในห้องนึ่งทิ้ง
- กรณีที่เครื่องไม่มีถังพักน้ำ เมื่อน้ำหายร้อนแล้ว ให้เทน้ำออกทางหน้าต่างห้องนึ่ง จากนั้นให้ใช้ผ้าเช็ดให้แห้ง

- 5** ระบายน้ำในห้องนึ่งทิ้ง กรณีที่เครื่องรุ่นที่มีถังพักน้ำ



- กรณีที่เครื่องรุ่นที่มีถังพักน้ำ ให้ปลดน้ำไปเก็บไว้ในถังพักก่อน จึงค่อยทำการเทน้ำทิ้ง
- จากนั้นดึงสายยางวัดระดับน้ำให้ต่ำกว่าตัวเครื่องเพื่อระบายน้ำทิ้ง (ระวังอุณหภูมิที่น้ำยังร้อนอยู่)

- 6** เติมน้ำสะอาดอีกครั้ง จนท่วมคอยล์ความร้อน



- เติมน้ำสะอาดอีกครั้ง จนท่วมคอยล์ความร้อน ปิดประตูห้องนึ่งให้สนิท จากนั้นทำการเปิดเครื่อง Autoclave ให้เริ่มทำงาน Sterilization โดยไม่ต้องใส่ผงล้างทำความสะอาด หรือห่อผ้าเข้าไป
- ไม่ต้องใช้ขั้นตอนอบแห้ง (Dry Heat)

- 7** ใช้ผ้าแห้งสะอาด เช็ดทำความสะอาด



- เมื่อเสร็จสิ้นการทำงาน Sterilization ให้ปิดเครื่อง จากนั้นทำการระบายน้ำออก และใช้ผ้าแห้งทำการเช็ดให้สะอาดจนหมดเพื่อล้างคราบผงทำความสะอาดที่อาจหลงเหลืออยู่ ออกให้หมด

หมายเหตุ : ขั้นตอนที่ 6 กับ 7 มีความสำคัญ ถ้าไม่ปฏิบัติตามจะส่งผลให้มีผงล้างทำความสะอาด ตกค้างอยู่ในห้องนึ่ง และถ้าไม่มีการเช็ดทำความสะอาดให้แห้งหลังจากใช้ผงล้างทำความสะอาดจะส่งผลให้ภายในห้องนึ่งเกิดสนิมขึ้นตามมาได้

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม : บริษัท เบสท์ อีควิปเม้นท์ เซ็นเตอร์ จำกัด



0-2903-1916, 0-2903-3354



@becvet



@bec_vet



bec_vet



www.bec-vet.com



info@bec-vet.com



bec_vet



@becvet

